



Niebieska deska. Huśtawka rehabilitacyjna BO 4505

Wiek

■ 3+

Huśtawka terapeutyczna do stymulacji układu przedsionkowego, poprawy koordynacji ruchowo-wzrokowej, ćwiczeń równowagi dynamicznej i reakcji posturalnej. Umożliwia aktywność w pozycji siedzącej i stojącej. Wyposażona w dwa drewniane poręczne uchwyty i platformę o powierzchni antypoślizgowej. Całość zawieszona na regulowanych linach z tworzywa sztucznego zamocowanych w 4 punktach platformy oraz na końcach uchwytów. Huśtawka podwieszana jest za pomocą 2 karabińczyków (nie dołączono do zestawu).



Specyfikacja

- wym. platformy: 80 x 1,8 x 20 cm,
- wysokość regulowana do 160 cm;
- materiał: drewno, pianka EVA, tworzywo sztuczne, metal
- maksymalne obciążenie: do 100 kg

SI IN BO 4505 12/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Huśtawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat. Niebezpieczeństwo utraty równowagi i kontuzji.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Uwaga.

- Tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
- Można używać urządzenia na zewnątrz pod warunkiem ochrony przed bezpośrednią ekspozycją na działanie promieni słonecznych.
- Po zawieszeniu, odległość platformy od podłoża nie powinna być większa niż 60 cm i mniejsza niż 35 cm.

Bezpieczeństwo

- Sprzęt mocujący nie jest dołączony do urządzenia.
- W idealnym przypadku huśtawka powinna być zawieszona nad trawą, piaskiem, lub innym miękkim podłożem.
- W żadnym wypadku nie należy zawieszać jej nad betonem, asfaltem lub innym twardym podłożem. Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia u użytkownika sprzętu. Odległość od podłoża nie powinna przekraczać 60 cm i być mniejsza niż 35 cm.
- Huśtawka może być zawieszona na ramie w kształcie litery „A” lub zestawie huśtawkowym.
- Sprzęt powinien być zawieszony w taki sposób, aby wokół niego było po 2 m wolnej przestrzeni z każdej strony.
- Wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Informacje przeznaczone dla dzieci użytkujących sprzęt
- Należy się odpowiednio podczas korzystania z huśtawki (unikąć szerokich strojów, chust i długich szalików oraz wszelkiej odzieży, która może stwarzać potencjalnie zagrożenie.
- Należy założyć dobrze dopasowane obuwie, które w pełni przylega do stopy. Chodaki, klapki i sandały są nieodpowiednie i mogą stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo.

Tego nie należy robić:

- Podchodzić blisko, przed, za lub między ruchomymi elementami.
- Wychodzić z huśtawki, gdy jest w ruchu.
- Wspinać się na huśtawkę, gdy jest w trakcie użytkowania przez inną osobę.
- Na huśtawce nie mogą znajdować się przedmioty, które mogą spowodować zagrożenie uduszeniem.
- Na huśtawce należy nosić kask rowerowy lub sportowy.

Konserwacja urządzenia

- Przed każdym użyciem, dorośli powinni sprawdzić wszystkie części metalowe i liny
- Jeśli huśtawka jest zawieszona na ramie zestawu huśtawkowego, należy nasmarować wszystkie metalowe, ruchome elementy.
- Wszystkie wadliwe i uszkodzone części należy wymienić zgodnie z zaleceniem producenta.
- Przed dłuższą przerwą i wyłączeniem urządzenia z użytku, lub gdy temperatura spadnie poniżej 5 stopni, dorośli powinni:
- Zdjąć huśtawkę i wnieść ją do pomieszczenia.
- Huśtawkę należy przechowywać w suchym miejscu.
- Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.