



Polecamy także:

Kołderka obciążeniowa		
kod	rozmiar	dane
NS2254	S	wym. 60 x 100 cm; pikowana, obciążenie: 1,5 kg
NS2255	M	wym. 90 x 120 cm; pikowana, obciążenie: 3 kg
NS2256	L	wym. 100 x 150 cm, pikowana, obciążenie: 4 kg
NS2261	XL	wzrost pow. 155 cm; pikowana, wym. 100 x 150 cm; obciążenie: 5 kg
Kamizelka obciążeniowa		
kod	rozmiar	dane
NS2251	S	wzrost 110–125 cm, ob. kl. piersiowej: 50 cm, obciążenie: 2,1 kg
NS2252	M	wzrost 125–140 cm, ob. kl. piersiowej: 60 cm, obciążenie: 2,8 kg
NS2253	L	wzrost 140–155 cm, ob. kl. piersiowej: 70 cm, obciążenie: 3,6 kg
NS2262	XL	wzrost pow. 155 cm; szer. pow. 55 cm, wys. 65 cm; pikowana, obciążenie: 4,5 kg



Kołnierz obciążeniowy

NS 2247
NS 2248
NS 2249
NS 2250



Wiek

- 3+

Zawartość

- 1 szt.;
- rozmiar XL;
- wym.: 50 x 60 cm;
- dla osoby o wzroście: od 155 cm;
- waga: 2 kg;
- pokrycie: tkanina tłoczona Minky w kolorze piaskowym, tkanina bawełniana w kolorze białym;
- wypełnienie: kulki szklane;
- regulowane zapięcie na klamrę zatrzaskową

Przeznaczenie

Kołnierz wykonany z miękkiej, sensorycznej tkaniny Minky z okrągłymi tłoczeniami oraz dzianiny bawełnianej. Para plastikowych klamerek zatrzaskowych, ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie kołnierza.

W trakcie użytkowania wywiera delikatny nacisk na ciało i stymuluje układ przedsionkowo-propryoceptywny, który odpowiada za czucie głębokie.

Stymulowanie proprioceptorów rozluźnia, uspokaja i zwiększa świadomość ciała, poprawiając skupienie oraz koncentrację, ogranicza

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Produkt można prać w pralce w 30 stopniach z lekkim wirowaniem, bez konieczności wyciągnięcia wypełnienia.
3. Produkt powinien być użytkowany pod kontrolą osoby dorosłej.
4. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
5. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
6. Produkt nie zawiera żadnych zabronionych lub niezdrowych materiałów.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

zachowania autostymulacyjne oraz pomaga niwelować uczucie lęku, niepokoju i niepewności.

Zaburzenia integracji sensorycznej i modulowanie reakcji na bodźce

Przyczyną zaburzeń integracji sensorycznej jest niedojrzały układ nerwowy, niezdolny do właściwego gromadzenia i przetwarzania bodźców dochodzących zarówno z ciała, jak i z zewnątrz. Nadmierna ilość informacji przepływających od zmysłów do mózgu sprawia, że nie jest on w stanie poradzić sobie z nimi. W efekcie, dziecko ale również i dorośli nie potrafią skoncentrować się i funkcjonować w sposób zorganizowany

Kołnierz obciążeniowy poleca się m.in.:

- osobom autystycznym,
- osobom z zaburzeniami integracji sensorycznej,
- cierpiącym na nerwicę lękową, jak i nerwicę natręctw,
- osobom zmagającym się depresją lub podobnymi zaburzeniami
- psychicznymi,
- osobom z zespołem stresu pourazowego.

Kołnierz wywiera głęboki nacisk na mięśnie, stawy i ścięgna. Stymuluje w ten sposób zmysł czucia głębokiego. Nałożony na ramiona poprawia koncentrację, zwiększa świadomość ciała, a także wycisza.


Świetnie sprawdza się w chwilach, gdy konieczne jest wytężone skupienie. Dodatkowo nacisk na mięsień czworoboczny karku pomaga rozluźnić się i zrelaksować. W niektórych sytuacjach kołnierz lepiej niż na ramionach sprawdza się na udach. Wszystko zależy więc od indywidualnych preferencji użytkownika.

Użytkowanie kołnierza

Sytuacje, w których może być wykorzystywany kołnierz obciążeniowy, bywają przeróżne. Najczęściej rodzice dzieci autystycznych wymieniają momenty, w których jest on używany jak swoiste koło ratunkowe (pomaga zawrócić umysł dziecka z niespokojnych obszarów i skiero-

wać go na właściwe tory). Sytuacje, w których kołnierz znajduje swoje zastosowanie:

- chwile spędzone przy odrabianiu lekcji, gdy potrzebna jest koncentracja uwagi,
- sytuacje powodujące szczególnie niepokój, np. podróż środkami transportu publicznego,
- okresy, w których rutynowy plan dnia ulega załamaniu,
- chwile, w których zauważalne są symptomy nadchodzącego kryzysu (przed wybuchem agresji),
- chwile, gdy przytłacza otoczenie,
- gdy pojawia się autoagresja,
- wizyta w kinie, restauracji i innych obiektach użyteczności publicznej,
- spotkania z bliskimi i znajomymi, itp.

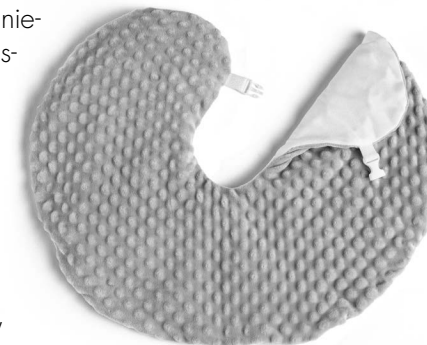

Oczywiście kołnierze sensoryczne są też wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych

Jak należy dobrać kołnierz – podstawowe informacje

Wymiary i waga kołnierza muszą być dopasowane do rozmiarów osoby, która będzie go używać.

W ofercie Nowej Szkoły mamy do wyboru kilka rozmiarów kołnierza:

Kod produktu	Rozmiar	Wzrost	Obciążenie	Kolor
NS2248	S	110–125 cm	0,8 kg	szary
NS2249	M	125–140 cm	1 kg	granatowy
NS2250	L	140–155 cm	1,2 kg	turkus
NS2247	XL	Od 155 cm	2 kg	piaskowy beż