



2.

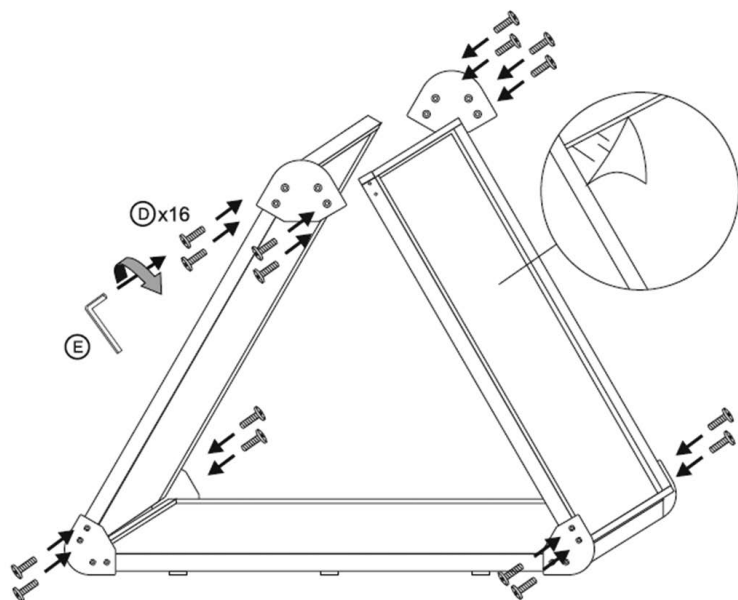

Gotowe

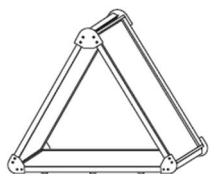

nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Piramida lustrzana RV 0006



Wiek

■ 3+

Doskonała pomoc terapeutyczna, która rozbudzi zmysł wzroku dziecka. Zbudowana z 3 dwukierunkowych paneli lustrzanych, zmontowanych w postaci graniastostupa trójkątnego. Specjalny system łączenia lusterek tworzy efekt kalejdoskopu, który przeniesie dziecko w niesamowity świat pełen barw, kształtów i obrazów. Rdzeń paneli stanowi kartonowa płyta „plaster miodu” oraz tafle z akrylu lustrzanego po obu stronach. Dolny panel, na który użytkownik wchodzi wzmocniono wewnątrz płytami HDF oraz dodatkowymi poprzeczkami ze sklejki.

Specyfikacja produktu

- wymiar: 121 cm x 59 cm x 106,5 cm,
- materiał: sklejka liściasta, laminowana płyta MDF o grubości 12 mm, szkło akrylowe.

Piramida sprawdzi się doskonale do ćwiczeń logopedycznych, zabaw rozwijających samoświadomość oraz zmysł obserwacji u dziecka. Lustrzane szkło akrylowe na stałe umieszczone w ramach jest bezpieczne dla małych rączek.

Zwierciadła wykonano z bezpiecznego i solidnego, odpornego na zarysowania szkła akrylowego. Doskonały przyrząd do doświadczeń własnego odbicia lub odbić różnych przedmiotów w terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz do ćwiczeń logopedycznych.

SI IN RV 0006 08/22

Lustro logopedyczne jest nieodłącznym elementem wyposażenia każdego gabinetu logopedycznego. Akcesorium to jest niezbędne do efektywnej pracy z dzieckiem. Dzięki niemu zarówno logopeda, jak i dziecko mogą dokonywać wzajemnej obserwacji ułożenia narządów podczas wykonywania ćwiczeń. Kształt piramidy sprawia, że lustro staje się bardzo atrakcyjne np. dzięki możliwości uzyskania efektu głębi. Piramida nadaje się także jako pomoc podczas zadań polepszających emisję głosu i zapobiegających skurczom artykulatorów. Do takich ćwiczeń należy trening szerokiego i miękkiego otwierania

i zamykania ust, a także wiele innych ćwiczeń emisyjnych. Dzięki lustru dziecko może samo zaobserwować pracę swojego aparatu mowy i poszczególnych narządów. Logopeda natomiast w obrazowy sposób może zwrócić uwagę dziecka na pewne zagadnienia i korygować natychmiast ewentualne nieprawidłowości.

Z lustrem dziecko chętnie ćwiczy mięśnie buzi i języka. Atrakcyjne stają się ćwiczenia szerokiego i miękkiego otwierania ust. Lustra w ćwiczeniach logopedycznych powinny być wykonywane początkowo właśnie z wykorzystaniem lustra. Istotne jest, aby zarówno dziecko jak i nauczyciel mieli kontrolę wzrokową nad danymi ćwiczeniami.





- Czas montażu ok. 20 minut.




20 min

- Montaż najlepiej wykonać w dwie osoby.

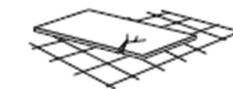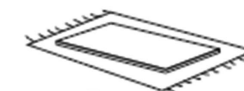

Montaż wykonaj na miękkiej powierzchni, najlepiej pokrytej dywanem lub wykładziną. Nie montuj luster na twardych powierzchniach takich jak np. płytki, by uniknąć stłuczenia się luster.

Instrukcja montażu

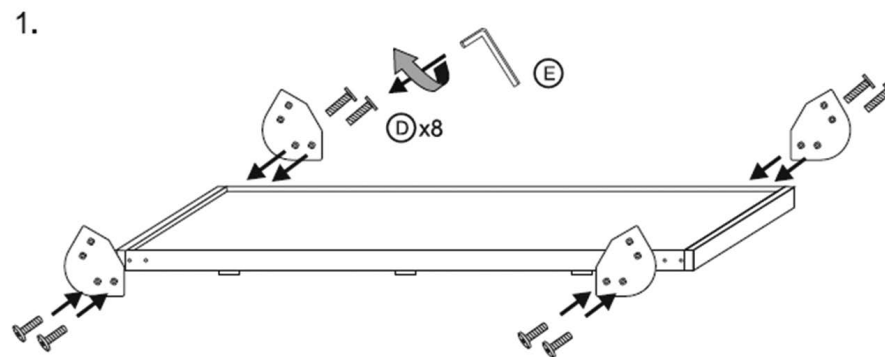

Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie:

- wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczękę dolnej,
- płukanie gardła ciepłą wodą,
- chrapanie na wdechu i wydechu,
- nadymanie policzków z zatkanym nosem itp.

Ćwiczenia policzków:




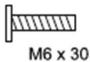

- nadymanie policzków,
- wciąganie policzków,
- nabieranie powietrza w usta i zatrzymanie w jamie ustnej (krążenie tym powietrzem) i powolne wypuszczanie go itp.

Ćwiczenia prawidłowego połykania:

- unoszenie języka na wałek dziąsłowy za górnymi zębami przy otwartych a następnie zamkniętych ustach,
- lizanie czubkiem języka wałka dziąsłowego itp.

Opowiadanie bajek artykulacyjnych.

Elementy zestawu

A		1
B		2
C		6
D	 M6 x 30	24
E		1

Przykładowe zabawy logopedyczne z lustrem

Pamiętaj, aby czas trwania i liczbę powtórzeń dostosować do indywidualnych możliwości dziecka. Lepiej ćwiczyć krótko, ale częściej 3 - 4 minut z 3-latkami, do 10 ze starszym dzieckiem.

Naśladowanie głosów zwierząt:

- kota,
- psa,
- krowy,
- kury,
- koguta,
- kaczki,
- gęsi itp.

Naśladowanie odgłosów pojazdów:

- samochodu,
- pociągu,
- motoru,
- traktora itp.



Naśladowanie dźwięków różnych urządzeń codziennego użytku:

- odkurzacz,
- mikser,
- suszarka,
- pralka itp.

Różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe:

- wdech,
- wydech,
- dmuchanie piórka,
- chuchanie na lustro itp.



Ćwiczenia warg:

- wymawianie na przemian „a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie górnej i dolnej wargi,
- oddalanie od siebie kącików ust – wymawianie „iii”,
- cmokanie,
- parskanie,
- wysuwanie warg w przód itp.

Ćwiczenia języka:

- „głaskanie podniebienia” czubkiem języka (jama ustna szeroko otwarta),
- dotykanie językiem do nosa,
- rurka, r
- uchy koliste językiem w prawo i w lewo na zewnątrz jamy ustnej itp.

