


Przeciwwskazania do szczotkowania

- Ważne, by nie się masować dziecka, które wyraźnie daje do zrozumienia, że tego nie chce.
- gorączka,
- choroba,
- przebyte niedawno szczepienie,
- zmiany skórne,
- podrażnienie skóry spowodowane wcześniejszym masażem.

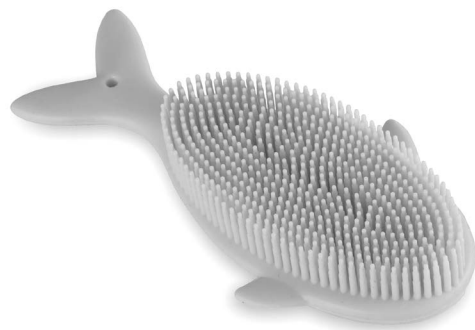

Konserwacja

- Zaleca się wymianę szczotki co 20-30 dni.

Uwagi

- Należy pamiętać, aby przy masażu profesjonalnym zawsze być pod opieką terapeuty – specjalisty.
- Nie należy samodzielnie wykonywać masażu terapeutycznych.
- Przed rozpoczęciem masażu należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi przeciwwskazaniami oraz zdobyć niezbędną na temat techniki jego wykonywania.

OSTRZEŻENIA!


1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesięcy.
2. Do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje, które mogą być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Wieloryb. Szczotka do masażu UT 0047

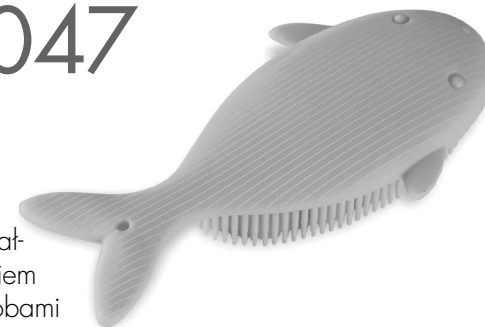

Wiek

- 6 mies.+

Szczotka do masażu w kształcie wieloryba jest narzędziem w pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi z zaburzeniami sensorycznymi. Delikatne silikonowe wypustki masują ciało i stymulują receptory pobudzając czucie głębokie. Może być pomocna w zajęciach z dziećmi ze spektrum autyzmu i nadpobudliwością.

Specyfikacja produktu:


- wymiar szczotki: 14 x 2 x 6 cm
- materiał: bezpieczny silikon;
- kolor: pomarańczowy

Szczotki używane są często podczas terapii integracji sensorycznej do masażu Wilbarger – stosowanego głównie u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, autyzmem i problemami z koncentracją, podczas którego u dzieci włosie szczotki dociska się mocno do ciała. Można go stosować również dla niemowląt szczotkując dziecko lekimi, delikatnymi ruchami.

Masaż ma na celu stymulację zakończeń nerwowych ciała, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i zmniejsza napięcie. Masaże w przypadku dzieci z trudnościami wykonuje się zgodnie z zaleceniami terapeuty i pod jego stałą opieką. W przypadku osób i dzieci niewymagających specjalistycznej opieki można również używać szczotki do masażu samodzielnie w domu delikatnie czesząc ciało.

Przeciwwskazania do szczotkowania

- Ważne, by nie się masować dziecka, które wyraźnie daje do zrozumienia, że tego nie chce.
- gorączka,
- choroba,
- przebyte niedawno szczepienie,
- zmiany skórne,
- podrażnienie skóry spowodowane wcześniejszym masażem.

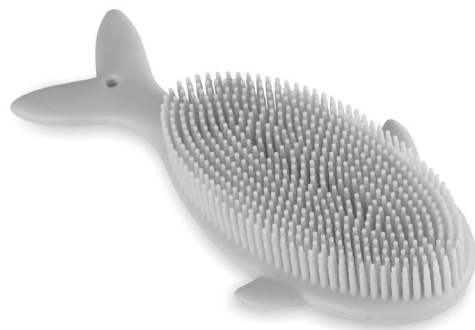

Konserwacja

- Zaleca się wymianę szczotki co 20-30 dni.

Uwagi

- Należy pamiętać, aby przy masażu profesjonalnym zawsze być pod opieką terapeuty – specjalisty.
- Nie należy samodzielnie wykonywać masażu terapeutycznych.
- Przed rozpoczęciem masażu należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi przeciwwskazaniami oraz zdobyć niezbędną na temat techniki jego wykonywania.

OSTRZEŻENIA!


1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesięcy.
2. Do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje, które mogą być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Wieloryb. Szczotka do masażu UT 0047

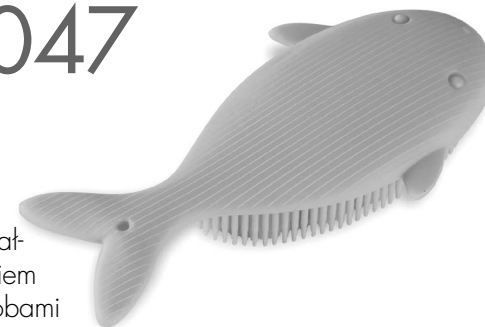

Wiek

- 6 mies.+

Szczotka do masażu w kształcie wieloryba jest narzędziem w pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi z zaburzeniami sensorycznymi. Delikatne silikonowe wypustki masują ciało i stymulują receptory pobudzając czucie głębokie. Może być pomocna w zajęciach z dziećmi ze spektrum autyzmu i nadpobudliwością.

Specyfikacja produktu:

- wymiar szczotki: 14 x 2 x 6 cm
- materiał: bezpieczny silikon;
- kolor: pomarańczowy

Szczotki używane są często podczas terapii integracji sensorycznej do masażu Wilbarger – stosowanego głównie u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, autyzmem i problemami z koncentracją, podczas którego u dzieci włosie szczotki dociska się mocno do ciała. Można go stosować również dla niemowląt szczotkując dziecko lekko, delikatnymi ruchami.

Masaż ma na celu stymulację zakończeń nerwowych ciała, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i zmniejsza napięcie. Masaże w przypadku dzieci z trudnościami wykonuje się zgodnie z zaleceniami terapeuty i pod jego stałą opieką. W przypadku osób i dzieci niewymagających specjalistycznej opieki można również używać szczotki do masażu samodzielnie w domu delikatnie czesząc ciało.