

2. W sporcie

W ćwiczeniach ogólno-rozwojowych kształtujących: zwinność, szybkość, gibkość, skoczność i równowagę.

III. Budowa:

Artykuł wykonany jest z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości pokrytą tkaniną PCW.

IV. Sposób konserwowania

Myc lub przecierać wilgotną szmatką namoczoną w wodzie z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha.

Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie.

W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

V. Zalecenia

1. Nie umieszczać wyrobu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
2. Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
3. Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Prosimy zachować instrukcję.
6. W przypadku uszkodzenia artykułu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

UWAGA!



WSZYSTKIE ĆWICZENIA – SZCZEGÓLNIJE U DZIECI Z ZABURZENIAMI NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I Z IDIOPATYCZNYMI BOCZNYMI SKRZYWIENIAMI KRĘGOSŁUPA POWINNY BYĆ WYKONYWANE POD NADZOREM WYKWAŁIFIKOWANEGO TERAPEUTY LUB PO DOKŁADNYM INSTRUKTAŻU!



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28


OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Bujaki

NS 2188, NS 2189, NS 2190

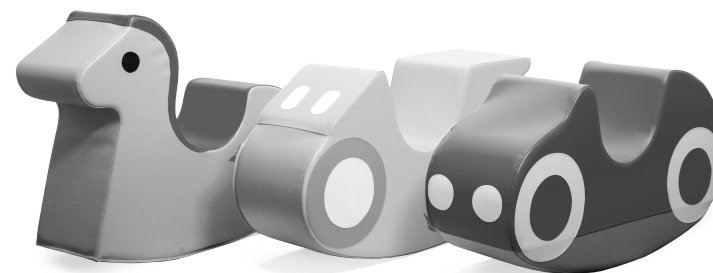

I. Dane techniczne:

NS 2188 Bujak – Auto, wym. 87 x 26 x 48, wys. siedziska 26 cm

NS 2189 Bujaczek – Kucyk, wym. 62 x 51 x 30 cm

NS 2190 Bujaczek – Motocykl, wym. 152 x 111 x 30 cm

II. Zastosowanie:

1. W rehabilitacji dzieci:

z zespołem Downa; dysfunkcjami integracji sensorycznej: nadpobudliwością ruchową, deficytami uwagi, zaburzeniami koordynacji ruchowej oraz organizacji zachowania

Rodzaj wykonywanych ćwiczeń:

- ćwiczenia wchodzące w zakres leczenia (korygowania) postawy ciała:
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne (symetryczne i asymetryczne).
- ćwiczenia rozciągające mięśnie obręczy barkowej i biodrowej.
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych i korygujące ich ustawienie.

2. W sporcie

W ćwiczeniach ogólno-rozwojowych kształtujących: zwinność, szybkość, gibkość, skoczność i równowagę.

III. Budowa:

Artykuł wykonany jest z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości pokrytą tkaniną PCW.

IV. Sposób konserwowania

Myc lub przecierać wilgotną szmatką namoczoną w wodzie z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha.

Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie.

W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

V. Zalecenia

1. Nie umieszczać wyrobu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
2. Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
3. Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Prosimy zachować instrukcję.
6. W przypadku uszkodzenia artykułu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

UWAGA!



WSZYSTKIE ĆWICZENIA – SZCZEGÓLNIEM U DZIECI Z ZABURZENIAMI NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I Z IDIOPATYCZNYMI BOCZNYMI SKRZYWIENIAMI KRĘGOSŁUPA POWINNY BYĆ WYKONYWANE POD NADZOREM WYKWAŁIFIKOWANEGO TERAPEUTY LUB PO DOKŁADNYM INSTRUKTAŻU!



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28


OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Bujaki

NS 2188, NS 2189, NS 2190

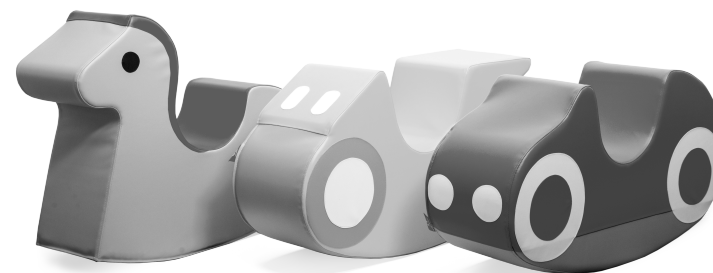

I. Dane techniczne:

NS 2188 Bujak – Auto, wym. 87 x 26 x 48, wys. siedziska 26 cm

NS 2189 Bujaczek – Kucyk, wym. 62 x 51 x 30 cm

NS 2190 Bujaczek – Motocykl, wym. 152 x 111 x 30 cm

II. Zastosowanie:

1. W rehabilitacji dzieci:

z zespołem Downa; dysfunkcjami integracji sensorycznej: nadpobudliwością ruchową, deficytami uwagi, zaburzeniami koordynacji ruchowej oraz organizacji zachowania

Rodzaj wykonywanych ćwiczeń:

- ćwiczenia wchodzące w zakres leczenia (korygowania) postawy ciała:
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne (symetryczne i asymetryczne).
- ćwiczenia rozciągające mięśnie obręczy barkowej i biodrowej.
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych i korygujące ich ustawienie.