



## Duszek. Worek rozciągliwy

NS 2265 rozmiar M  
NS 2266 rozmiar L  
NS 2267 rozmiar XL



Elastyczny worek stosowany w celu stymulacji układu prioreceptywnego. Regularne korzystanie z duszka pozwala dziecku na wykształcenie lepszej świadomości czucia własnego ciała, co ma szczególne znaczenie dla osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzięki mocnemu naciskowi, jaki worek wywiera na ciało, możliwe jest ograniczenie zachowań autostymulacyjnych, a w efekcie polepszenie koncentracji oraz wykształcenie lepszej koordynacji ruchowej. Wyposażony w zamek błyskawiczny, który ułatwia zakładanie i ściąganie duszka.

### Specyfikacja produktu:

- NS 2265 rozmiar M; dł. 120 cm; zamek błyskawiczny; materiał: laycra; kolor: szary
- NS 2266 rozmiar L; dł. 142 cm; zamek błyskawiczny; materiał: laycra; kolor: niebieski
- NS 2267 rozmiar XL; dł. 167 cm; zamek błyskawiczny; materiał: laycra; kolor: zielony

**Ważne!** Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowa-

SI IN NS 2265\_6\_7 05/20



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)

tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat. Ryzyko uduszenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



nie tej informacji na przyszłość. Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od źródeł ognia. Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo utraty równowagi.

### **Ważne informacje**

- tkanina wykonana z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

### **Użytkowanie**

Worek wykonany jest w formie kombinezonu, który zapina się za pomocą suwaka błyskawicznego. Przygotowany jest z elastycznego materiału, który rozciąga się, a następnie powracając do pierwotnych rozmiarów, stopniowo zwiększa nacisk na ciało.

Po rozpięciu suwaka użytkownik wchodzi do środka i zasuwa zamek. Należy tak umiejscowić stopy, aby trafić w rogi duszka. Następnie resztę ciała schować do duszka, a ręce – w górne rogi. W zależności od potrzeby, głowa może pozostać na zewnątrz lub być schowana do środka. Duszek jest „za mały”, dlatego użytkownik powinien możliwie najmocniej go rozciągnąć.

Aktywność z duszkiem może odbywać się na stojąco lub na leżąco, w domu lub na dworze. Należy pamiętać, aby nigdy nie spuszczać z oczu dziecka, które bawi się w duszku.

Podczas zabawy z duszkiem nie ma ryzyka zbyt mocnego nacisku na ciało użytkownika i wyrządzenia krzywdy, ponieważ osoba sama dozuje siłę rozpierania duszka.

### **Konserwacja**

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Można prać ręcznie lub mechanicznie z dodatkiem łagodnych środków piorących w temperaturze do 30°C.
- Nie suszyć w suszarce.
- Nie chlorować.
- Nie używać środków agresywnych chemicznie.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć. W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie załatać. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.