

Zalecenia:

1. Nie wkładać do ognia i trzymać z dala od źródeł ciepła.
2. Nie stosować narzędzi o ostrych krawędziach.
3. Nie umieszczać w miejscu, na które pada bezpośrednio światło słoneczne.
4. Postępować zgodnie z instrukcją.
5. W razie uszkodzenia, ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
6. Przechowywać instrukcję powodu zawartych w niej ważnych informacji.

WSZYSTKIE ĆWICZENIA, SZCZEGÓLNIIE Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NAPIĘCIA MIĘŚNI IDIOPATYCZNEGO KRĘGOSŁUPA KRZYWIZNY, NALEŻY PRZEPROWADZAĆ JEDYNIIE POD NADZOREM WYKWALIFIKOWANEGO TERAPEUTY LUB PO SZCZEGÓŁOWYM PRZESZKOLENIU!



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Puf Koniczynka

NS3380 średnia, kolor mięta

NS3381 średnia, kolor zieleń trawy

NS3382 średnia, kolor morski

■ wym. 52,6 x 56,3 cm; wys. siedziska: 32 cm

NS3383 wysoka, kolor zieleń morska

NS3384 wysoka, kolor szaro-beżowy

■ wym. 52,6 x 56,3 cm; wys. siedziska: 45 cm

Wiek

■ 12 mies.+

Piankowe siedzisko, które w razie potrzeby może pełnić także funkcję stolika. Dzięki ciekawemu kształtowi przypominającemu koniczynę, siedzisko charakteryzuje się modułowością. Po zestawieniu ze sobą kilku siedzisk z tej serii, powstaje cały zestaw wypoczynkowy idealnie dopasowanych do siebie elementów. Łączyć ze sobą można siedziska w obydwu dostępnych wysokościach.



Specyfikacja

- pokrycie: beżfalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie,
- wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości.

Wygodne, modułowe siedzisko o średniej wysokości spełni swoją funkcję w szatniach, korytarzach, czy pod salami lekcyjnymi. Ułatwi zmianę obuwia i umożliwi zwyczajny odpoczynek. Urozmaici zajęcia terapeutyczne. Można ustawić je na środku pomieszczenia tworząc wyspę.

Puf koniczynka stanowi również niezbędne wyposażenie dla bezpiecznej i komfortowej terapii. Wykonany z pianki poliuretanowej o podwyższonej sprężystości, pokrytej beżfalanową tkaniną PCW w kolorze miętowym. Może pełnić funkcję miękkiego siedziska, izolując ćwiczące lub odpoczywające dziecko od chłodnego podłoża. Tworzy miękką przestrzeń rehabilitacyjną, po której można też bezpiecznie chodzić, toczyć się i pełzać. Jest bardzo przydatny do doskonalenia

umiejętności motorycznych - przede wszystkim motorykę dużą np. podczas ćwiczeń gimnastycznych jako element toru przeszkód czy równoważnia. Motoryka duża to priorytet w rozwoju ruchowym dziecka. Jest to pierwszy i nadrzędny etap rozwoju ruchowego, a im więcej ćwiczeń w formie ruchu będzie wykonywało dziecko, tym łatwiej przyjdzie mu wykonywanie zadań wymagających innych sprawności. Motoryka duża obejmuje wszelkie ruchy, które angażują całe ciało lub jego większą część.

Puf ożywi każde wnętrze, sprawi że będzie ono bardziej funkcjonalne oraz zachęci dzieci do zabawy. Bardzo łatwe w dezynfekcji i w utrzymaniu czystości.

Puf doskonale sprawdzi się na zajęciach rehabilitacyjnych, sensorycznych, gimnastycznych, a także w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaburzenia integracji sensorycznej są wynikiem tego, że mózg dziecka ma problem z odpowiednim odbiorem i przetwarzaniem bodźców zewnętrznych. Prawidłowo dobrana terapia z wykorzystaniem siedziska pomaga dzieciom w łatwy sposób poprawić funkcjonowanie w życiu codziennym. Puf może być wykorzystywany w trakcie różnych ćwiczeń, podczas zabiegów oraz odpoczynku. Świetnie sprawdzi się w rehabilitacji ogólnej oraz gimnastyce korekcyjnej. Polecany jest także dla dzieci. Wykorzystanie go podczas zabawy, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki. Jest to niezbędny element w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie masażu czy też szkole i przedszkolu. Ćwiczenia z jego wykorzystaniem pobudzą i poprawią kondycję psychiczną i fizyczną dzieci, a także zagwarantują dzieciom wspaniałą zabawę i wypoczynek.

Terapia gimnastyczna z wykorzystaniem siedziska w kształcie koniczynki poprawi kontrolę i płynność ruchów, reakcje posturalne, planowanie ruchu, świadomość



ciała, somatognozę, napięcie mięśniowe, koordynację ruchową, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję dotykową.

Zabawa wspierana odpowiednio dobranymi aktywnościami sensorycznymi rozwija u dzieci zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Systematyczne ćwiczenia z siedziskiem poprawią funkcje czuciowe dziecka. Celem takich działań jest pobudzenie obszarów mózgu, związanych z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych, wykorzystanie plastyczności mózgu i wzmocnienie siły połączeń neuronalnych.

łatwe czyszczenie: wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką.

Nie wystawiaj na długotrwałe działanie promieni słonecznych i innych warunków atmosferycznych.

Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość. Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Trzymać z daleka od źródeł ognia. Niebezpieczeństwo utraty równowagi.

Ważne informacje

- tkanina zewnętrzna i wypełnienie środka wykonane z certyfikowanych surowców.
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem

Konserwacja

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Przecierać wilgotną szmatką namoczoną wodą z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć do sucha.
- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić tkaninę.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć. W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie załatać. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.