

- wym.: dł. 100 cm, szer. 118 cm;
- materiał: Minky w kolorze turkusowym i szarym;
- wypełnienie: pianka o gr. 1,5 cm

BEZPIECZEŃSTWO

Dywan terapeutyczny należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pod żadnym pozorem nie wolno zawijać w dywan dziecka powyżej linii barków. Niewłaściwe korzystanie z dywanu niesie ze sobą ryzyko uduszenia.

Podczas zajęć terapeutycznych z użyciem dywanu dziecko przez cały czas musi znajdować się pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.

Dziecku nie wolno samodzielnie korzystać z dywanu.

Gdyby dziecko zaczęło odczuwać dyskomfort związany z unieruchomieniem ciała należy natychmiast zwolnić paski z rzepami.



Naleśnik. Dywan terapeutyczny NS 8995



Wiek

- 2+

Pomoc terapeutyczna zaprojektowana z myślą o terapii sensorycznej. Dziecko należy precyzyjnie zawinąć w naleśnik - dywan w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie dociśnięcie i stymulowanie receptorów. Terapeuta lub rodzic dziecka może dodatkowo je masować, dociskać i ugniatać. Produkt został wyposażony w paski zapisane na rzep, których konstrukcja gwarantuje łatwe oswobodzenie i wydostanie z naleśnika.

Aktywność z pomocą zwiększa świadomość własnego ciała, stymuluje układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Produkt dedykowany jest dzieciom z zaburzeniami SI oraz wielbicielom przytulnych ciasnych przestrzeni.

SPECYFIKACJA

Miękki naleśnik wykonany jest z łagodnej i przyjemnej w dotyku tkaniny Minky, a jego wnętrze wypełnia pianka poliuretanowa. Dzięki charakterystycznym, okrągłym wytłoczeniom powierzchni oraz wymiarom naleśnik może pełnić rolę dywanu terapeutycznego podczas zabaw tematycznych czy podłogowych.

SI IN NS 8995 11/21



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 2 lat – ryzyko uduszenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



- wym.: dł. 100 cm, szer. 118 cm;
- materiał: Minky w kolorze turkusowym i szarym;
- wypełnienie: pianka o gr. 1,5 cm

BEZPIECZEŃSTWO

Dywan terapeutyczny należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pod żadnym pozorem nie wolno zawijać w dywan dziecka powyżej linii barków. Niewłaściwe korzystanie z dywanu niesie ze sobą ryzyko uduszenia.

Podczas zajęć terapeutycznych z użyciem dywanu dziecko przez cały czas musi znajdować się pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.

Dziecku nie wolno samodzielnie korzystać z dywanu.

Gdyby dziecko zaczęło odczuwać dyskomfort związany z unieruchomieniem ciała należy natychmiast zwolnić paski z rzepami.



Naleśnik. Dywan terapeutyczny NS 8995



Wiek

- 2+

Pomoc terapeutyczna zaprojektowana z myślą o terapii sensorycznej. Dziecko należy precyzyjnie zawinąć w naleśnik - dywan w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie dociśnięcie i stymulowanie receptorów. Terapeuta lub rodzic dziecka może dodatkowo je masować, dociskać i ugniatać. Produkt został wyposażony w pasy zapisane na rzep, których konstrukcja gwarantuje łatwe oswobodzenie i wydostanie z naleśnika.

Aktywność z pomocą zwiększa świadomość własnego ciała, stymuluje układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Produkt dedykowany jest dzieciom z zaburzeniami SI oraz wielbicielom przytulnych ciasnych przestrzeni.

SPECYFIKACJA

Miękki naleśnik wykonany jest z łagodnej i przyjemnej w dotyku tkaniny Minky, a jego wnętrze wypełnia pianka poliuretanowa. Dzięki charakterystycznym, okrągłym wytłoczeniom powierzchni oraz wymiarom naleśnik może pełnić rolę dywanu terapeutycznego podczas zabaw tematycznych czy podłogowych.

SI IN NS 8995 11/21



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 2 lat – ryzyko uduszenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**

